



Sani-Cloth AF Universal – lietošanas informācija

Sani-Cloth AF universālās salvetes ir iepriekš dozētas vienreizējas lietošanas dezinfekcijas un tīrīšanas salvetes neporainām cietām virsmām un neinvazīvām medicīnas ierīcēm.

Lietošana: Visu virsmu dezinfekcija medicīnas zonā.

Norādījumi: izdaliet salveti no iepakojuma, noslaukiet virsmu S kustībā no laukuma augšas uz leju.

Pārliecinieties, ka virsma vajadzīgajā saskares laikā paliek redzami mitra, ja nepieciešams, izmantojiet citu salveti. Ļaujiet virsmai nožūt.

Uzmanību: Izvairieties no saskares ar acīm. Ja rodas kairinājums, pārtrauciet lietošanu, ja kairinājums saglabājas, meklējiet medicīnisku palīdzību. Nelietot invazīvām medicīnas ierīcēm. Ievērojiet medicīnisko ierīču ražotāju tīrīšanas un dezinfekcijas norādījumus. Regulāri noņemiet dezinfekcijas līdzekļa atlikumu. Tikai profesionālai lietošanai.

IAL: atkārtotai vai ilgstošai iedarbībai izmantojiet cimdus.

Adrese: PDI Ltd, Aber Park, Flint, Flintshire, CH6 5EX

Uzglabāšana: uzglabāt produktu temperatūrā līdz 23 ° C. Uzglabāt vertikāli. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Produkta lietošana: Šis produkts ir paredzēts vienreizējai lietošanai. Kad salvete ir izdalīta no iepakojuma, to var izmantot tikai vienu reizi, un pēc tam tas jāiznīcina. Pārmērīga lietošana un atkārtota izmantošana nenodrošinās efektivitāti, kas nepieciešama pareizai produkta lietošanai. Nelietojiet, ja šķiet, ka iepakojums ir bojāts.

Nelietojiet sausas salvetes.

Sastāvs: didecildimetilamonija hlorīds 0,450% w / w

Normatīvā klasifikācija: Ar CE marķējumu 93/42 / EEK

Izdots 23.07.2020

IFU-13-LV 1. Red

Iepakojums

	Produkta kods	Iepakojuma formāts	Salvešu skaits iepakojumā	Iepakojumu skaits kastē	Salvetes izmērs	NHS kods
	XP00390		200 salvetes	6	267x210mm	VJT592
	XP00391	Iepakojums flow wrap	40 salvetes	24	200x200mm	VJT640
	XP00363	Iepakojums flow wrap	100 salvetes	12	280x200mm	VJT521
	XP00366	Kanistera	200 salvetes	6	200x200mm	VJT514
	XP00365	Spainis	225 salvetes	1	267x270mm	VJT513

Kā lietot salveti

1. Pārbaudiet iekšējās instrukcijas, lai pārliecinātos, vai produktam, apgabalam un aprīkojumam, ko gatavojaties tīrīt un/vai dezinficēt, tiek izmantoti pareizie IAL.

Skatiet etiķetes instrukcijas un “Use by date”.

LAIKS PĒC ATVERŠANAS

2. Pārbaudiet derīguma termiņu.

3. Ir pieejamas instrukcijas kanisteras, iepakojuma flow wrap un spaiņa atvēršanai.

4. Lietošanas instrukcija - ar pirmo salveti noņemiet redzamo netīrumu, pēc tam dezinficējiet ar papildu salveti.
5. Izvelciet tikai vienu salveti tīrīšanas reizē. Atlokiel salveti.
6. Tīrīšanas virzienam jābūt no augšas līdz apakšai, uzmanoties, lai divreiz nepāriet pāri vienai un tai pašai zonai, tādējādi novēršot jebkādu krustenisku piesārņojumu.
7. Iedarbības laiks un nožūšanas laiks
 - a. Viena salvete nosedz aptuveni viena (1) kvadrātmetru no virsmas laukuma.
Neizmantojiet salvetes pārāk lielā daudzumā, ja salvete kļūst sausa vai netīra, izmantojiet vēl vienu tīrīšanas salveti. lai pabeigtu virsmas tīrīšanu.
 - b. Ļaujiet dezinficētajai zonai izžūt.
 - c. Atbrīvojieties no izlietotām salvetēm klīniskajā atkritumu tvertnē.
 - d. Pēc lietošanas pārlicinieties, ka iepakojuma vāks ir aizvērts. Kad iepakojums ir iztukšots, utilizējiet to atkritumu tvertnē vai atbilstoši vietējiem noteikumiem.

PRODUKTA EFEKTIVITĀTE	
EN 16615 4 lauku pārbaude (mehāniska darbība)	BAKTERIJAS
Enterococcus hirae	60 sek (c)
Pseudomonas aeruginosa	60 sek (c)
Staphylococcus aureus	60 sek (c)
EN 13727	BAKTERIJAS
Pseudomonas aeruginosa	30 sek (c)
Staphylococcus aureus	30 sek (c)
Enterococcus hirae	30 sek (c)
EN 16615 4-Field Test (Mechanical Action)	YEAST
Candida albicans	60 sek (c)
EN 13624	IERAUGS
Candida albicans	30sek (c)
Candida auris	30sek (c)
EN 14476	APVALKOTS VĪRUSS
Vacciniavirus	30 sek (c)
(HBV, HCV, HIV, H5N1, SARS, Corona)	30 sek (c)
EN 14476	NEAPVALKOTS VĪRUSS
Norovirus	30 sek (c)
EN 14348	TB
Mycobacterium terrae	2min (c)

Iepakojuma simboli

Lūk, daži no izplatītākajiem simboliem, kas atrodami uz PDI produktu iepakojuma, un to apraksts:

Simbola nosaukums	Simbolu apraksts	Simbols (<i>Krāsas var atšķirties</i>)
Nenoskalot	Nenoskalot	
Nemērcēt	Nemērcēt	
Skatīt lietošanas instrukcijas	Norāda uz lietotāja nepieciešamību iepazīties ar lietošanas instrukcijām, kas pieejamas vietnē www.pdihc.com/global	
CE zīme	CE zīmes medicīnas ierīču direktīva, IIa klase	
Nelietot atkārtoti	Norāda, ka medicīnas ierīce (salvete) paredzēta vienai lietošanas reizei vai lietošanai vienam pacientam vienas procedūras laikā	
Ražotājs	Norāda medicīnas ierīču ražotāju, kā noteikts ES Direktīvās 90/385/EEK, 93/42/EEC un 98/79/EK	
Izteikts šķidrums	Stabilitāte un testēšana veikta ar šķidrumu no salvetes, nevis no beztaras šķidruma.	
PAO	Periods pēc produkta atvēršanas – laiks, kurā produktu var lietot, kad produkts ir ticis atvērts.	
Salvešu skaits	Cik salvešu ir iepakojumā.	
LOT	Piešķirts produkta partijas vai partijas numurs	
Derīguma termiņš	Produkta derīguma termiņš	
Augsta blīvuma polietilēns (HDPE)	HDPE 2 ir augsta blīvuma un izturības attiecība, un to parasti pārstrādā, un tā sveķu identifikācijas kods ir skaitlis "2". Kanisteras un spaini.	

Etiķetes elementi

Paziņojumi par bīstamību	
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību
Piesardzības paziņojumi	
P273	Izvairieties no nokļūšanas vidē
P501	Iznīciniet saturu / konteineru saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / valsts noteikumiem.

Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā NEX MEDICAL ANTISEPTICS S.r.l.

Via Per Arluno 37/39 20010 CASOREZZO (MI) Italy

Bieži uzdotie jautājumi

Kāds ir kontakta laiks un kas notiek, ja virsma nožūst pirms noteiktā kontakta laika, kas norādīts uz Sani-Cloth produkta etiķetes?

Kontakta laiks, kas norādīts Sani-Cloth produkta marķējumā, ir kopējais laiks, kas nepieciešams, lai deaktivizētu mikroorganismus, kuri norādīti uz produkta etiķetes. Šo laiku parasti norāda minūtēs, un tas jādara zināms darbiniekiem, kuri izmanto dezinfekcijas līdzekli. Noteiktos ģeogrāfiskos apstākļos un arī apstākļos, kad temperatūra, relatīvais mitrums un gaisa pārmaiņas var atšķirties, ir iespējams, ka noteiktā kontakta laikā virsma var nepalikt redzami mitra. Pašreizējie nozares norādījumi paredz, ka apstrādātā virsma vai aprīkojums paliek mitrs uz produkta marķējumā norādīto kontakta laiku. Var būt vajadzīgas papildu salvetes, lai ievērotu nozares norādījumus, tomēr kopējais kontakta laiks nemainās.

Lai gan pašreizējie nozares norādījumi paredz, ka apstrādātajām virsmām ir jāpaliek mitrām noteiktā kontakta laikā, vadošie pētnieki infekciju profilaksē piedāvā alternatīvu skatījumu. Komentārā, kas publicēts Infekcijas kontroles un slimnīcu epidemioloģijā (2018. gada marts, vol. 39, Nr. 3, pp 229-331), Dr. W.A. Rutala un Dr. D. J. Weber iesaka, ka kontakta laiks un ārstēšanas laiks ir savstarpēji izslēdzoši. Viņi iesaka veselības aprūpes darbiniekiem ievērot ārstēšanas laiku, neatkarīgi no mitrā laika, lietojot salvetes un aerosolus (izņemot balinātājus). PDI turpinās stingri uzraudzīt zinātnes publikācijas un sniegt saviem klientiem jaunāko informāciju. Pēc tīrīšanas un dezinfekcijas virsmai jāļauj pilnībā izžūt.

Papildinformācija

Šīs IFU drukātās kopijas ir pieejamas pēc pieprasījuma. E-pasts: sales@pdi-hc.co.uk

Iepriekšējās IFU versijas ir pieejamas pēc pieprasījuma. E-pasts: sales@pdi-hc.co.uk

Dokumenta valoda: angļu (EN)