



SUPER SANI_CLOTH PLUS – LIETOŠANAS INFORMĀCIJA

Super Sani-Cloth Plus ir iepriekš dozētas, spirta saturošas vienreizējas lietošanas dezinfekcijas salvetes neporainām cietām virsmām un neinvazīvām medicīnas ierīcēm.

Lietošana: Visu virsmu dezinfekcija medicīnas zonā.

Norādījumi: izdaliet salveti no iepakojuma, noslaukiet virsmu S kustībā no laukuma augšas uz leju. Pārliecinieties, ka virsma vajadzīgajā saskares laikā paliek redzami mitra, ja nepieciešams, izmantojiet citu salveti. Ļaujiet virsmai nožūt.

Uzmanību: valkāt aizsargcimdus,

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens, izvairīties no saskares ar acīm,
SASKARĒ AR ACĪM: vairākas minūtes uzmanīgi skalot. Noņemiet kontaktlēcas; ja tas ir klāt un to viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu. Saņemt medicīnisko palīdzību. Sargāt no karstuma - aizliegts smēķēt. Iznīciniet tvertni saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nelietot invazīvās medicīnas ierīcēs. Ievērojiet medicīnas ierīču ražotāju tīrīšanas un dezinfekcijas vadlīnijas. **Tikai profesionālai lietošanai.**

INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI (IAL): iesakām lietot cimdus.

Adrese: PDI Ltd, Aber Park, Flint, Flintshire, CH6 5EX

Uzglabāšana: uzglabāt vertikāli. Sargāt no tiešiem saules stariem. Sargāt no atklātas liesmas.

Produkta lietošana: Šis produkts ir paredzēts vienreizējai lietošanai. Kad salvete ir izdalīta no iepakojuma, to var izmantot tikai vienu reizi, un pēc tam tas jāiznīcina. Pārmērīga lietošana un atkārtota izmantošana nenodrošinās efektivitāti, kas nepieciešama pareizai produkta lietošanai. Nelietojiet, ja iepakojums šķiet bojāts. Nelietojiet sausas salvetes.

Sastāvs: izopropilspirts B.P 70% v / v, alkildimetilbenzilamonija hlorīds 0,25%, alkildimetiletilbenzilamonija hlorīds 0,25%.

Normatīvā klasifikācija: Ar CE marķējumu 93/42 / EEK

Iepakojums

	Produkta kods	Iepakojuma formāts	Salvešu skaits iepakojumā	Iepakojumu skaits kastē	Salvetes izmērs	NHS kods
	XP00141	Tvertne	200	6	200x200mm	VJT007
	XP00192	Tvertne	125	6	185x133mm	VJT594

Kā lietot salveti



Before you start always wear the correct PPE.



1. Pārbaudiet iekšējās instrukcijas, lai pārlicinātos, vai produktam, apgabalam un aprīkojumam, ko gatavojaties tīrīt un/vai dezinficēt, tiek izmantoti pareizie IAL.




Refer to label instructions and 'Use by' date.



**PERIOD
AFTER
OPENING**

2.

Skatiet etiķetes instrukcijas un "Use by date". Pārbaudiet derīguma termiņu.
PAO- LAIKS PĒC ATKLĀŠANAS

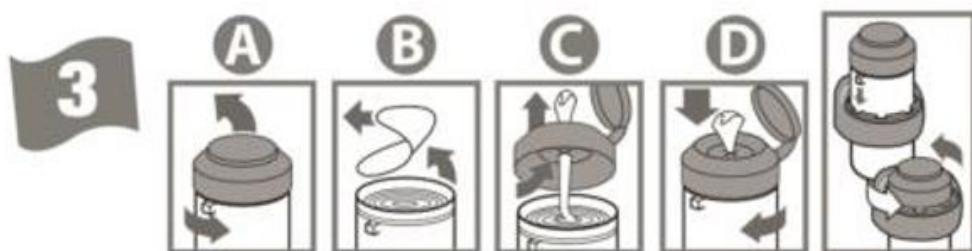

3. Norādījumi par iepakojuma atvēršanu.

4

VISIBLY CLEAN ? VISIBLY SOILED

Remove any visible soiling with first wipe before using additional wipes.

4. Salvešu lietošanas instrukcija - Notīriet visus redzamos netīrumus ar pirmo tīrīšanas salveti, pēc tam izmantojiet papildu salveti, lai dezinficētu.



5. Izvelciet tikai vienu salveti tīrīšanas reizē. Atlokiet salveti.



6. Tīrīšanas virzienam jābūt no augšas līdz apakšai, uzmanoties, lai divreiz nepāriet pāri vienai un tai pašai zonai, tādējādi novēršot jebkādu krustenisku piesārņojumu.



**Recommended surface area coverage 1m square.
Allow disinfectant to dry on surface- Contact time.**



Dispose of used wipe into clinical waste.

7. Iedarbības laiks un nožūšanas laiks

- Viena salvete nosedz aptuveni viena (1) kvadrātmetru no virsmas laukuma. Neizmantojiet salvetes pārāk lielā daudzumā, ja salvete kļūst sausa vai netīra, izmantojiet vēl vienu tīršanas salveti. lai pabeigtu virsmas tīršanu.
- Ļaujiet dezinficētajai zonai izžūt.
- Atbrīvojieties no izlietotām salvetēm klīniskajā atkritumu tvertnē.
- Pēc lietošanas pārlicinieties, ka iepakojuma vāks ir aizvērts. Kad iepakojums ir iztukšots, utilizējiet to atkritumu tvertnē vai atbilstoši vietējiem noteikumiem

PRODUKTA EFEKTIVITĀTE	
EN 16615 4 lauku pārbaude (mehāniska darbība)	BAKTERIJAS
Pseudomonas aeruginosa	60 sek (c)
Staphylococcus aureus	60 sek (c)
Enterococcus hirae	60 sek (c)
EN 13727	BAKTERIJAS
Staphylococcus aureus	60 sek(d)
Escherichia coli	60 sek(d)
Pseudomonas aeruginosa	60 sek(d)
Enterococcus hirae	60 sek(d)
EN 13697	BAKTERIJAS
Escherichia coli	60 sek(d)
Enterococcus hirae	60 sek(d)
Staphylococcus aureus	60 sek(d)
Pseudomonas aeruginosa	60 sek(d)
EN 14561	BAKTERIJAS
Methicillin izturīgs Staphylococcus aureus (MRSA)	2 min (d)
EN 1276	BAKTERIJAS

Pseudomonas aeruginosa	30 sek(c+d)
Escherichia coli	30 sek (c+d)
Enterococcus hirae	30 sek(c+d)
Staphylococcus aureus	30 sek(c+d)
EN 16615 4-Field Test (Mechanical Action)	SĒNES UN RAUGUMI
Candida Albicans (Yeast)	60 sek (c)
EN 13624	SĒNES UN RAUGUMI
Candida Albicans (Yeast)	30 sek(d)
EN 13697	SĒNES UN RAUGUMI
Candida Albicans (Yeast)	60 sek(d)
EN 14476	APVALKOTS VĪRUSS
Vacciniavirus (HBV, HCV, HIV, H5N1, SARS, Corona)	15 sek(c+d)
EN 14348	TB
Mycobacterium terrae	30 sek (c)

Produkta efektivitāte / Pretenzijas par produktu: uzskaitītajam laikam var sekot burti, kas norāda testa apstākļus, kas izmantoti produkta testēšanas laikā (c) tīriem apstākļiem vai (d) netīriem apstākļiem.

PRODUKTA EFEKTIVITĀTE - EPA testa rezultāti (USA)	
US EPA Vadlīnijas (noslaukšanas tests)	BAKTERIJAS
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	5min (d)
Escherichia coli O157:H7 (ATCC 35150)	5min (d)
Staphylococcus aureus ATCC 6538	5min (d)
Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	4min (d)
Salmonella Choleraesuis ATCC 10708	5min (d)
Methicillin resistant Staph aureus (MRSA) (ATCC 33591)	5min (d)
Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis	5min (d)
US EPA Guidelines (wipe test)-	SĒNES UN RAUGUMI
Candida albicans ATCC 11651 (Yeast)	4min (d)
US EPA Guidelines (wipe test)-	APVALKOTS VĪRUSS
HIV - 1 Type 1	1min (d)
Influenza A Hong Kong	1min (d)
Vaccinia virus	1min (d)
Herpes simplex tips 2	1min (d)
US EPA Vadlīnijas (noslaukšanas tests) - Southern Research Inst.	NEAPVALKOTS VĪRUSS
Adenovirus	1min (d)
Rhinovirus	1min(d)

US EPA Guidelines (wipe test)-	TB
Mycobacterium bovis	1min (d)

IEPAKOJUMA SIMBOLI

Lūk, daži no izplatītākajiem simboliem, kas atrodami uz PDI produktu iepakojuma, un to apraksts:

Simbola nosaukums	Simbolu apraksts	Simbols (Krāsas var atšķirties)
Nenoskalot	Nenoskalot	
Nemērcēt	Nemērcēt	
Skatīt lietošanas instrukcijas	Norāda, ka lietotājam ir jāiepazīstas ar lietošanas instrukcijām	
CE zīme	CE zīmes medicīnas ierīču direktīva, IIa klase	
Nelietot atkārtoti	Norāda, ka medicīnas ierīce (salvete) paredzēta vienai lietošanas reizei vai lietošanai vienam pacientam vienas procedūras laikā	
Ražotājs	Norāda medicīnas ierīču ražotāju, kā noteikts ES Direktīvās 90/385/EEK, 93/42EEC un 98/79/EK	
Izteikts šķidrums	Stabilitāte un testēšana veikta ar šķidrumu no salvetes, nevis no beztaras šķidruma.	
PAO	Periods pēc produkta atvēršanas – laiks, kurā produktu var lietot, kad produkts ir ticis atvērts.	
Salvešu skaits	Cik salvešu ir iepakojumā.	
LOT	Piešķirts produkta partijas vai partijas numurs	
Derīguma termiņš	Produkta derīguma termiņš	
Augsta blīvuma polietilēns (HDPE)	HDPE 2 ir augsta blīvuma un izturības attiecība, un to parasti pārstrādā, un tā sveķu identifikācijas kods ir skaitlis “2”.	

ETIĶETES ELEMENTI

SIMBOLI		
	KAIRINOŠS	VIEGLI UZLIESMOJOŠS
Signālvārds	BĪSTAMĪBA	
Paziņojumi par bīstamību		
H225	Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki	
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu	
H336	Var izraisīt miegainību vai reiboni	
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību	
Piesardzības paziņojumi		
P280	Valkāt aizsargcimdus / aizsargapģērbu	
P210	Sargāt no karstuma / dzirkstelēm / atklātas liesmas / karstām virsmām - aizliegts smēķēt	
P235	Turiet vēsu.	
P302+P350	SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens.	
P305+P351+P338+P313	SASKARĒ AR ACĪM: Piesardzīgi izskalojiet vairākas minūtes. Noņemiet kontaktlēcas; ja tas ir klāt un to viegli izdarīt. Turpiniet skalošanu. Saņemt medicīnisko palīdzību / palīdzību.	
P501	Iznīciniet saturu / konteineru saskaņā ar vietējiem / reģionālajiem / valsts noteikumiem.	

Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā

NEX MEDICAL ANTISEPTICS S.r.l.

Via Per Arluno 37/39 20010 CASOREZZO (MI) Italy



BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI °

Kāds ir kontakta laiks un kas notiek, ja virsma nožūst pirms noteiktā kontakta laika, kas norādīts uz Sani-Cloth produkta etiķetes?

Kontakta laiks, kas norādīts Sani-Cloth produkta marķējumā, ir kopējais laiks, kas nepieciešams, lai deaktivizētu mikroorganismus, kuri norādīti uz produkta etiķetes. Šo laiku parasti norāda minūtēs, un tas jādara zināms darbiniekiem, kuri izmanto dezinfekcijas līdzekli. Noteiktos ģeogrāfiskos apstākļos un arī apstākļos, kad temperatūra, relatīvais mitrums un gaisa pārmaiņas var atšķirties, ir iespējams, ka noteiktā kontakta laikā virsma var nepalikt redzami mitra. Pašreizējie nozares norādījumi paredz, ka apstrādātā virsma vai aprīkojums paliek mitrs uz produkta marķējumā norādīto kontakta laiku. Var būt vajadzīgas papildu salvetes, lai ievērotu nozares norādījumus, tomēr kopējais kontakta laiks nemainās.

Lai gan pašreizējie nozares norādījumi paredz, ka apstrādātajām virsmām ir jāpaliek mitrām noteiktā kontakta laikā, vadošie pētnieki infekciju profilaksē piedāvā alternatīvu skatījumu. Komentārā, kas publicēts Infekcijas kontroles un slimnīcu epidemioloģijā (2018. gada marts, vol. 39, Nr. 3, pp 229-331), Dr. W.A. Rutala un Dr. D. J. Weber iesaka, ka kontakta laiks un ārstēšanas laiks ir savstarpēji izslēdzoši. Viņi iesaka veselības aprūpes darbiniekiem ievērot ārstēšanas laiku, neatkarīgi no mitrā laika, lietojot salvetes un aerosolus (izņemot balinātājus). PDI turpinās stingri uzraudzīt zinātnes publikācijas un sniegt saviem klientiem jaunāko informāciju.

Pēc tīrīšanas un dezinfekcijas virsmai jāļauj pilnībā izžūt.

PAPILDINFORMĀCIJA

Šīs IFU drukātās kopijas ir pieejamas pēc pieprasījuma. E-pasts: sales@pdi-hc.co.uk
Iepriekšējās IFU versijas ir pieejamas pēc pieprasījuma. E-pasts: sales@pdi-hc.co.uk
Dokumenta valoda: angļu (EN)