



# ZHIVAS LTD

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

# ENZYDIP – 3 AM

## CONCENTRĀTS MEDICĪNISKO INSTRUMENTU UN MEDICĪNISKO IERĪCES DEZINFEKCIJAI UN ENZĪMATĪVAI TĪRĪŠANAI



### Pieteikums

**EnzyDip-3 AM** ir paredzēts invazīvu un neinvazīvu medicīnas instrumentu un medicīnas ierīču dezinfekcijai un fermentatīvai tīrīšanai.

### Īpašības

**EnzyDip-3 AM** formula balstās uz ļoti efektīvu biocīdu, virsmaktīvo vielu un trīs enzīmu kompleksa (proteāzes, amilāzes un lipāzes) sinerģisku kombināciju. Tas ātri un efektīvi noņem medicīnas instrumentos asinis, atlikušos audus, olbaltumvielas, gļotas, ekskrementus un citu piesārņojumu, vienlaikus nodrošinot efektīvu dezinfekciju.

**Aktīvās vielas:** katrs 100 g **EnzyDip-3 AM** satur :

5.0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9)

18 g Enzyme complex – Protease (CAS 9014-01-1), Alpha-amylase (CAS 9000-90-2), Lipase (CAS 9001-62-1)

**Palīgvielas:** Virsmaktīvās vielas, korozijas inhibitori, helātu veidotāji, smaržvielas, krāsvielas, dejonizēts ūdens

**EnzyDip-3 AM** ir saderīgs ar dažādiem materiāliem, piemēram, nerūsējošā tērauda, alumīnija, krāsaino metālu, polivinilhlorīda, gumijas un plastmasas.

Tas ir viegli šķīstošs un tā darba šķīdumus sagatavo ar tab ūdens. Ūdens cietība neietekmē to efektivitāti.

Izskats : Caurspīdīgs gaiši brūns šķidrums

pH of 1 % šķīdums – 8.5- 9.5

Blīvums : 1.04 – 1.09 g/ cm<sup>3</sup>



## Klasifikācija :

**EnzyDip-3 AM** atbilst ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu Eiropas medicīnas ierīču direktīvas 93/42 / EEC prasībām un ir klasificēts kā medicīnas ierīce - IIb klase.

## Darbības spektrs

Baktericīds ,fungicīds ,virucidāls.

Mikrobioloģiskā aktivitāte	Koncentrācija	Pārbaudes metode	ekspozīcija
Bactericidal ( <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> )	0.5 %	EN 14561	15 min
Fungicidal ( <i>C.albicans</i> )	0.5 %	EN 14562	15 min
Virucidal ( <i>Vaccinia virus</i> , <i>Coronavirus</i> , <i>HIV</i> , <i>HBV</i> , <i>HCV – Enveloped viruses</i> )	2.0 %	EN 14476	15 min

## Lietošana:

Darba šķīdumu sagatavo, atšķaidot ar krāna ūdeni koncentrācijā un ekspozīcijas laikā parādīts iepriekš istabas temperatūrā.

Atkarībā no piesārņojuma veida un līmeņa **EnzyDip-3 AM** var izmantot augstākā līmenī koncentrāciju, lai panāktu ātrāku medicīnisko instrumentu attīrīšanu no organiskajiem piesārņotājiem.

Medicīnas instrumentiem un ierīcēm jābūt pilnībā iegremdētām darba šķīdumā, nodrošinot ka visi dobumi un atveres ir aizpildītas. Sausā piesārņojuma iepriekšēja tīrīšana ar otas palīdzību vai ieteicams izmantot sūkli.

Dezinfekciju un tīrīšanu var veikt arī ultraskaņas vannā.

Pēc apstrādes noskalojiet medicīniskos instrumentus un ierīces ar ūdeni.

Uzglabāšanas apstākļi

Cieši noslēgtā oriģinālajā konteinerā, sausā un vēdināmā vietā, temperatūrā no 5 ° C līdz 30 ° C.

Nepakļaujiet tiešiem saules stariem.

## Piesardzības pasākumi

Izvairieties no saskares ar citiem tīrīšanas līdzekļiem, kas satur aktīvo hloru (hipohlorītu, hloramīni). Neuzglabāt metāla traukos.

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja norīts, neizraisiet vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt šo iepakojumu vai etiķeti. Sīkāku informāciju skatiet drošības datu lapā.



# ZHIVAS LTD

## Bīstamības simboli:



GHS 05



GHS 08

Signālvārds: Bīstami

## Bīstamības apzīmējumi:

**H314** - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus..

**H317** - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

**H318** - Izraisa nopietnus acu bojājumus.

## Piesardzības paziņojumi:

**P102** Sargāt no bērniem.

**P280** Izmantot aizsargcimdus /aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

**P305+P351+P338 IEKĻŪSTOT ACĪS:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

**P304+P340 IEELPOJOT:** Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

**P342+P311** Ja rodas elpošanas traucējumu simptomi: sazinieties ar **SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/**: toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs , **+371 6704 2473**

## Glabāšanas nosacījumi:

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt slēgtā oriģinālajā iepakojumā sausā un labi vēdināmā vietā

telpās, prom no tiešiem saules stariem temperatūrā no 5°C līdz 30°C.

Atkritumu un iepakojumu apstrāde - saskaņā ar vietējiem noteikumiem

Neatstājiet koncentrātu vidē - atkritumu, atlieku un tukšo iepakojumu apglabāšanai, skatiet īpašos norādījumus drošības datu lapā.

**Iepakojumi:** Pudeles pa 1 L, kannas pa 5 L

**Derīguma termiņš:** 2 gadi

**Ražotājs:** ZHIVAS Ltd

Dondukova bulv. 36, Sofija 1000, Bulgārija

Tālr. / Fakss: (+359 2) 981 78 23, (+359 2) 980 25 07

[zhivas@techno-link.com](mailto:zhivas@techno-link.com);

[www.zhivas.com](http://www.zhivas.com)